

## Anwendung

Der **RECAproct** Tampon wird im Enddarm platziert. So werden Operationswunden im Analkanal auf ideale Weise „verbunden“. Vor dem Einsatz wird er in Wasser eingeweicht und dadurch elastisch und anpassungsfähig.

**RECAproct** ist anwendbar für fast alle proktologischen Operationen im Bereich distales Rectum bis über den anocutanen Übergang hinaus.

Als Beispiel:

- Hämorrhoiden Operation
- Verschiedene Analfisteln
- Fissurektomie
- Analrandplastik
- Marisken




Zur Schmerzstillung und Förderung der Heilung kann **RECAproct** aber auch mit adstringierenden Mitteln oder Anästhetikum versehen werden. Der Tampon kann getränkt werden z.B. mit Betailodona oder einem Lokalanästhetikum.

Produktdaten: **Art. Nr. 10.2**

Material: PVA-Schaumstoff - Faden: 100 % Polyester - Maße: 24 mm Ø, 70 mm Länge

## Gebrauchsanweisung:

- waschen und desinfizieren Sie sich die Hände und entfernen Sie die Folie
- wickeln Sie den Rückholfaden ab
- weichen Sie **RECAproct** kurz in warmem Wasser ein und drücken Sie den Tampon danach aus

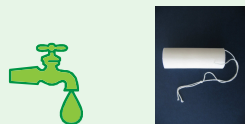

- platzieren Sie den Tampon

**RECAproct** kann, je nach medizinischer Indikation, bis zu 48 Stunden im Analkanal verbleiben. Entfernt wird er mit dem eingenähten Rückholfaden. Das Herausnehmen wird durch Anfeuchten des Tampons erleichtert.

Zu empfehlen ist ein Sitzbad, das gleichzeitig Beginn der postoperativen Wundpflege ist.

**Entsorgung: Bitte im Hausmüll entsorgen**

### Kontraindikation:

- Postoperative Blutungen und Schmerzen

### Nebenwirkungen:

- Analstenose  
Beeinträchtigung des Stuhlgangs möglich  
- zeitlich begrenzt
- Evtl. können sich später erneut Hämorrhoiden bilden (Rezidiv)

### Warnung:

Darf nicht angewendet werden bei akuten entzündlichen Erkrankungen im Darm, unklare Schmerzen im Bauchraum oder Perforation des Darmes. Bitte halten Sie sich an die Gebrauchsanweisung. RECA Med übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden bei unsachgemäßer Anwendung. Bei Mehrfachanwendung können die hygienischen Bedingungen nicht mehr gegeben sein.